

# Periodisk Inspektion

## Liko™ textila produkter



7SV160834 Rev. 4

Gäller för Liko™: Universalsele Mod. 000/002, UltraSling Mod. 06, Originalsele Mod. 10/11, Originalsele Hög Rygg Mod. 20/21, 200/210, Skalsele Mod. 22, Soft Originalsele Hög Mod. 26, Comfortsele Plus Mod. 300/310/350/360, Byxsele Mod. 40/41/45/46, Hygiensele Mod. 50/55, Lyftväst Mod. 60/64, Ståskalsväst Mod. 67, Amputationssele Mod. 70/75, Lyftbyxa Mod. 92, Ultra Lyftbyxa Mod. 920, Liko Lyftband Mod. 90, Uppresningsväst Mod. 91/99, Trygghetsväst Mod. 93/94, Comfortväst Mod. 95, Lyftduk Bläckfisken, Lyftband Bläckfisken, Lyftkryss Bläckfisken, Lyftduk 1900, Lyftduk 800/1800, Lyftduk XL, Lyftband XL, RepoLakan Original, Multiband, Huvudstöd, Grenband, Förlängningsögla, Spännband, Lyftband Mod 600 IVA

Produktinformation		Kundreferenser	
Produkt:		Avtalsnummer:	
Produktnummer:		Namn:	
Serienummer: Se sidan 2		Adress:	
Tillverkningsår: Se sidan 2		Postnummer:	

**!** Liko™ textila produkter måste inspekteras grundligt minst var 6:e månad. Tätare inspektioner kan krävas om produkten används eller tvättas oftare än normalt. Inspektionen ska utföras av en person som är utbildad eller har god erfarenhet och kunskap om design, användning och underhåll av produkten.

Periodiska inspektioner finns för: Liko™ Tillbehör (3SV601001), Taklyftar (3SV191001), Skensystem (3SV111001), Fristående lyftsystem (3SV301001) and Mobillyftar (3SV371001).

Vid utskrift av denna instruktion är det fördelaktigt att göra den i färg.

## Kontrollpunkter

### Liko textila produkter

Kontrollpunkter		Godkänd*	Ej godkänd
1	Produktetikett		
2	Förstärkningssömmar (tränsar)		
3	Öglor/Band		
4	Kantband		
5	Sömmar		
6	Tyg		
7	Styrhandtag/Bandstyrning		
8	Spänne		
9	Lattor (kan beställas nya)		
10	Dokumentation (kan beställas nya)		

\* Om kontrollpunkten inte finns på produkten, skriv NA (ej tillämplig).

### Signering efter inspektion

Utför inspektion enligt anvisningarna på sidan 2-5, fyll i den här sidan och skriv under nedan.

Godkännande att använda produkten:  Godkänd  Ej godkänd

Om produkten har en eller flera kontrollpunkter "Ej godkänd" får produkten ej längre användas.


Om någonting är oklart eller vid frågor kontakta Hill-Rom.



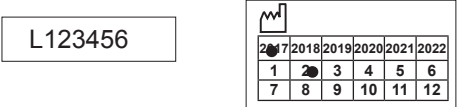
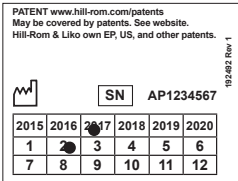

Inspektion utförd av:		Datum:	
Nästa inspektion:			

Inspektionen är utförd i enlighet med ISO 10535:2006 Annex B- Periodisk inspektion

# Instruktioner för kontrollpunkterna

Liko™ textila produkter

 Varningssymbolen anger att speciell försiktighet måste iakttagas.  
Risk för allvarliga skador föreligger om inte anvisningarna följs.

Tillverkningsår/Serienummer på textila produkter	
Textila produkter har tillverkningsår och serienummer placerat på olika sätt på produkten, se alternativen nedan.	
<b>Alt 1.</b> Produkten har serienummer och tillverkningsår på baksidan av produktetiketten. Serienumret i form av en bokstav åtföljd av en nummerserie och tillverkningsår/månad i form av y/m: YYYYMM.	Exempel: 
<b>Alt 2.</b> Produkten har serienummer och tillverkningsår på två separata etiketter under produktetiketten. Serienumret i form av en bokstav åtföljd av en nummerserie och tillverkningsår/månad i form av y/m: YYYYMM.	Exempel: 
<b>Alt 3.</b> Produkten har serienummer och tillverkningsår på två separata etiketter under produktetiketten. Serienumret i form av en bokstav åtföljd av en nummerserie och tillverkningsår/månad är i form av en tabell med nummer där år och månad är markerade.	Exempel: 
<b>Alt 4.</b> Produkten har serienummer och tillverkningsår på en separat etikett under produktetiketten. Serienumret i form av en bokstav åtföljd av en nummerserie och tillverkningsår/månad i form av en tabell med nummer där år och månad är markerade.	Exempel: 
<b>Alt 5.</b> Produkten har serienummer, tillverkningsår och GS1 datamatrixstreckkod på produktetiketten. Serienumret i form av en nummerserie, tillverkningsår/månad/dag i form av ÅÅÅÅ-MM-DD och GS1 i form av QR kod och nummer.  Alla produkter har inte serienummer.	Exempel: 

# Instruktioner för kontrollpunkterna

## Liko™ textila produkter

### 1 Produktetikett

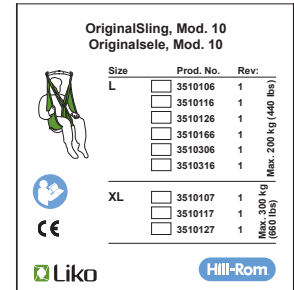
⚠ Kontrollera att följande kan utläsas på produktetiketten:

- produktnamn
- produktnummer
- maxlast
- serienummer (i förekommande fall)
- tillverkningsår
- skötselråd

På sidan 2 finns instruktioner var på produkten man hittar serienumret och tillverkningsår.

Notera: Förlängningsöglor, Grenband och Spännband har bara produktnamn och produktnummer.

Exempel:




### 2 Förstärknings sömmar (tränsar)

⚠ Kontrollera och säkerställ att trådar och sömmar är intakta. Sknade stygn och lösa trådar är ej godkänt.



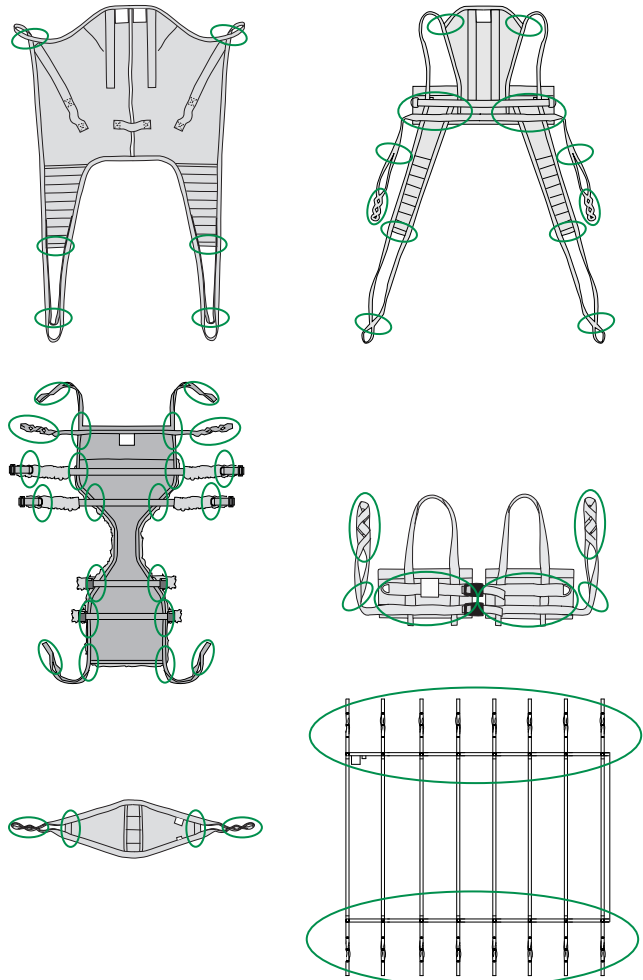Exempel:




# Instruktioner för kontrollpunkterna

Liko™ textila produkter

## 3 Öglor/Band

Kontrollera och säkerställ att öglor och band inte har skadats. Det visar sig oftast i form av synligt trasiga trådar.

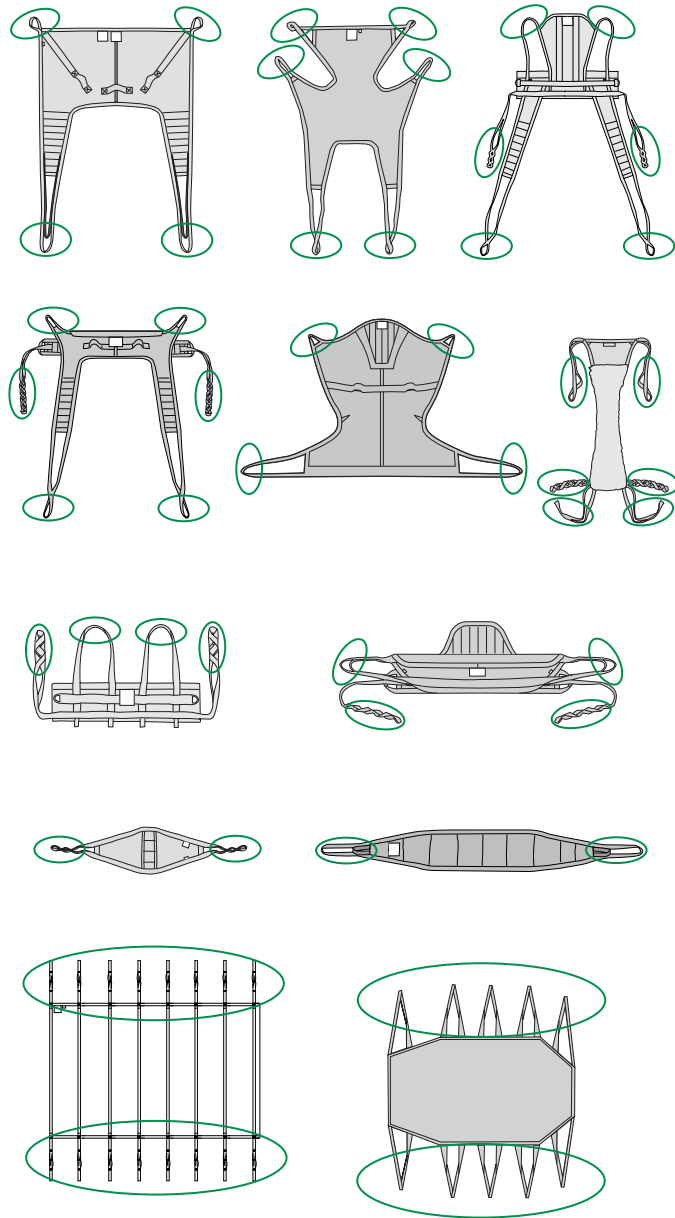
Exempel:



## 4 Kantband

Kontrollera att kantbandet inte är skadat.

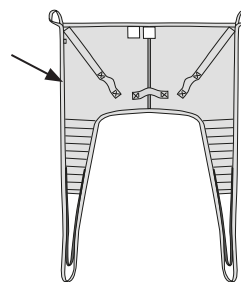Exempel:







## 5 Sömmar

Kontrollera och säkerställ att trådar och sömmar är intakta. Saknade stygn och lösa trådar är ej godkänt.

# Instruktioner för kontrollpunkterna
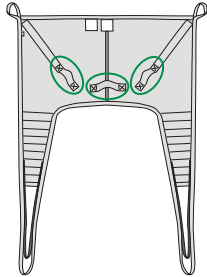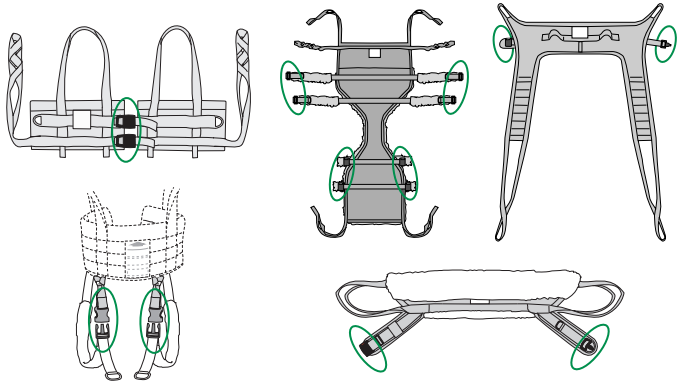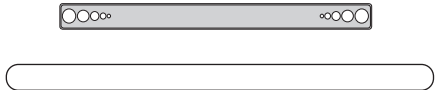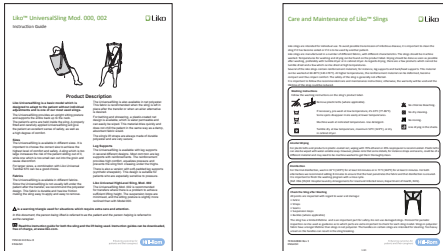
## Liko™ textila produkter

6 Fabric	
<p>Kontrollera och säkerställ att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tyget inte har hål, inte är tunt eller slitet</li> <li>• tyget längs med kantbandet inte är förslitet eller har hål</li> <li>• tyget under styrhandtagen är intakt</li> </ul>	
7 Styrhandtag/Bandstyrning	
<p>Kontrollera och säkerställ att sömmarna på styrhandtagen/bandstyrningen är intakta.</p>	<p>Exempel:</p> 
8 Spännen	
<p>Kontrollera spännets funktion genom att låsa spännet, drag i skärpet och se till att spännet inte öppnar sig. Kontrollera om det finns skarpa kanter.</p>	<p>Exempel:</p> 
9 Lattor	
<p>Om lattor behövs för funktionen, kontrollera att produkten har lattor.</p> <p>Om lattor saknas kan nya beställas från din Hill-Rom representant.</p>	
10 Dokumentation	
<p>Kontrollera att gällande bruksanvisning samt skötselråd finns tillgänglig.</p> <p>Om bruksanvisning och/eller skötselråd saknas kan nya beställas från din Hill-Rom representant.</p>	<p>Exempel:</p> 



[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)



Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Sweden  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

